

FICHA TÉCNICA

ASEPT



DETERGENTE DESINFETANTE CONCENTRADO

Detergente desinfetante concentrado para superfícies porosas com amplo espectro de atividade. Possui ação bactericida, fungicida e virucida. É indicado para a desinfecção de áreas hospitalares e todas as instituições ligadas à saúde. Graças à sua formulação com detergente, limpa e desinfeta num só passo.


MODO DE UTILIZAÇÃO

Para se obter os resultados pretendidos, as superfícies deverão estar previamente limpas. Aplicar o produto na diluição indicada e deixar atuar de acordo com os ensaios de eficácia constante no quadro abaixo. Poderá ser aplicada a solução diluída num pano, pulverizar a superfícies ou fazer a imersão dos equipamentos a desinfetar. Não necessita enxaguar

DILUIÇÃO

Diluir 4% a 7,5% (40 a 75 ml por 1 litro de água) de acordo com a área a limpar. (ver quadro abaixo)

PICTOGRAMAS

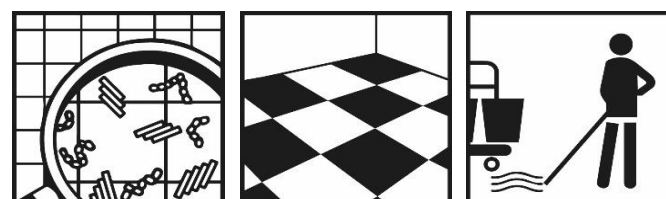

DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	pH	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade
Transparente	12,20 - 12,80	1,010 - 1,020	Característico	Incolor	Solúvel

FICHA TÉCNICA

ASEPT

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todas as informações respeitantes à segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

SIMBOLOGIA



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar fechado na embalagem original.
Evitar temperaturas extremas.
Unicamente para uso profissional

EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02003UNIASEPCX5L	5L	CX 4X5L	36 Cx

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.



FICHA TÉCNICA

ASEPT

Testes de Eficácia

Ensaio em Superfície

		Diluição de Uso
Actividade bactericida EN 13697:2015 5 min condições sujas	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli	4%
Actividade bactericida EN 13697:2015 5 min condições sujas	Listeria monocytogenes Salmonella typhimurim	4%
Actividade bactericida EN 13697:2015 15 min condições sujas	Pseudomonas aeruginosa	3%
Actividade fungicida EN 13697:2015 15 min condições sujas	Aspergillus brasiliensis Candida albicans	5%
Actividade yeasticidal EN 13697:2015 15 min condições sujas	Candida albicans	0,1%
Actividade yeasticidal EN 13697:2015 5 min condições sujas	Candida albicans	1%

Área médica

		Diluição de Uso
Actividade bactericida EN 13727 Condições sujas	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	5%
Actividade fungicida EN 13624 Condições sujas	Aspergillus brasiliensis Candida albicans	7,5%
Actividade levuricida EN 13624 Condições sujas	Candida albicans	2,5%
Actividade virucida EN 14476 Condições limpas	Poliovirus tipo 1 Adeno virus tipo 5 Murine norovirus	5%

